

# ReBorn はこんなふうに使っていただけます



モデル：トメさん


## ここが違う!



握りやすい太さと素材の良さでしっかりキャッチ。



安定感バツグン!! 安心して立っています。

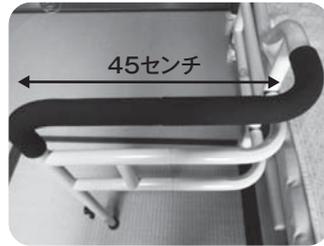

アームが長いので前かがみを助けます。

## ダメな例



撮影協力：栃木県 栗林荘様

## 注意点は?




取り付けられるベッドは

介護用ベッド





設置用の穴が直径2センチの円形。二つの穴の間が40センチ。深さが6、3センチのもの。

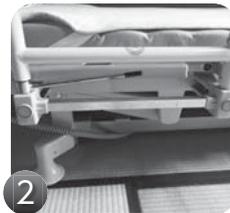

2

専用のアタッチメントが必要です。ベッドメーカーに別途お買い求めください。

ノンサイドフレームタイプの場合

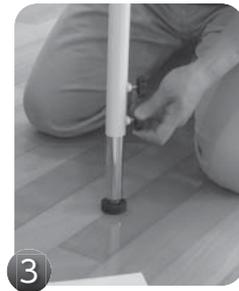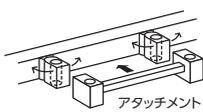

3



アジャスター

使うベッドの高さをご本人の立ちやすい高さに調節し、合わせてください。最後に底部分のアジャスターをしっかり回し、ぐらつきがないよう固定してください。

※左右の使いわけについては、組み立ての仕方でもちろんでも使用いただけます。左右はご本人の使いやすい方を見極めてからお決めください。

その他、組み立て方、取り付け方などわからないことはRX組HPをご覧ください。

1台 **19,950円(税込)** 19,000円(税抜)

※別途送料が必要です。

## ご注文の流れ



見積もり依頼・発注依頼・お問い合わせは

下記フォームにご記入の上、FAXで………075-432-8693 (RX組)  
ホームページから………<http://www.rx-gumi.com>



お見積り・ご発注は□に必ず✓をお入れください。 □ 見積もり依頼 □ 発注依頼 □ 問い合わせのみ

貴社名	法人名	ご担当者名 個人様の場合はこちらのみ			
	施設名				
TEL			FAX	メールアドレス	
希望台数	台	希望納期	年	月	取り付けるベッドのメーカー名
ご住所	都府		市	町	
	道県		区	建物名	
問い合わせ内容					